

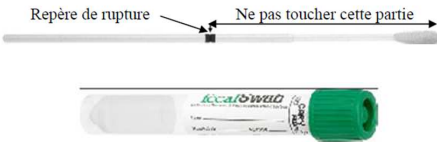




# PRELEVEMENT DE SELLES

Lettre d'information n°32

Juin 2013

**Recueillir les selles puis transférer dans le milieu de transport adapté à la demande**

| Analyse  | Stabilité à température ambiante | Milieu  | Technique   |
|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Coproculture</b><br><b>Recherche de Clostridium</b><br><b>Recherche d'Adenovirus, de Rotavirus et de Norovirus</b><br><b>Recherche de vérotoxines et O157, levures.</b> | 48h                              | <b>Fecal Swab</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir le sachet et piquer l'écouvillon dans la selle</li> <li>- Insérer l'écouvillon dans le tube avec milieu de transport</li> <li>- Casser la tige de l'écouvillon dans le tube               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bien revisser</li> </ul> </li> <li>- Identifier le prélèvement</li> </ul>  |
| <b>Parasitologie des selles</b>  | 12h                              | <b>Pot non stérile</b><br> |   |
| <b>Recherche de sang dans les selles</b>   | 48h                              | <b>Gaiac</b><br>          | <p>→ Soit à l'aide du dispositif papier fourni qu'il est possible de fixer sur les toilettes et d'éliminer avec la chasse d'eau (cf notice)</p> <p>→ Soit comme vous le faisiez auparavant : pot, couche...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dévisser le capuchon bleu et tenir le dispositif verticalement</li> <li>- Piquer le stylet bleu dans la selle à 3 endroits différents : très peu de selles suffisent (il n'est pas nécessaire de racler la selle)</li> <li>- Revisser le dispositif bleu sur le tube</li> <li>- Coller une étiquette patient sur le tube.</li> </ul> |

Laboratoire BIO67-BIOSPHERE

Assia ; Bethesda-Sleidan ; La Bruche/Schirmeck ; Haurany ; Hoenheim-Ried ; Illkirch ; Ingwiller ; Kling ; Kochersberg ; Lingolsheim ; Neuhoof ; Parc ; Polygone ; Poteries ; Meinau ; Neudorf ; Ostwald ; Printemps-Erstein, Robertsau ; Rosheim ; Saint-Luc/Schirmeck ; Schiltigheim Centre ; Schuh ; Saint Luc ; Soufflenheim ; Tremsz ; Val de Moder