

Type d'échantillon: prélèvement de gorge sur **écouvillon** spécifique deltalab.



Attention les écouvillons avec milieu de transport liquide (eswab) ne sont pas acceptés par manque de performance



Ecouvillon deltalab
(Amies liquide PS+VISCOSE)
contenant du matériel absorbant/éponge

Prélèvement des échantillons:

Les échantillons doivent être recueillis en frottant vigoureusement l'écouvillon sur les amygdales et la partie postérieure du pharynx.

Transport et conservation

Les échantillons doivent être conservés entre 2 et 29°C pendant le transport.

Les échantillons peuvent être conservés à température ambiante (19 et 29 C) jusqu'à 24 heures avant d'être analysés.

Si l'on ne commence pas l'analyse dans ce délai, on peut conserver l'échantillon à une température de 2 à 8 C pendant 14 jours maximum avant analyse.